

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ FeNO



ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.

24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ:

Συνιστάται να αποφεύγεται η κατανάλωση οινοπνεύματος για 24 ώρες πριν από τη μέτρηση ¹.

12 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ:

Συνιστάται να αποφεύγεται το κάπνισμα για 12 ώρες πριν από τη μέτρηση ¹.

Συνιστάται να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ²:

Ρόκα	Γογγύλια	Καρότα
Σπανάκι	Λάχανο	Πατάτες
Μαρούλι	Πράσινα φασόλια	Σκόρδο
Ραπανάκια	Πράσο	Πιπεριά
Παντζάρια	Φρέσκο κρεμμυδάκι	Πράσινη πιπεριά
Κινέζικο λάχανο	Αγγούρι	

ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

Την ημέρα της μέτρησης, συνιστάται να αποφεύγονται τα ακόλουθα, 1 ώρα πριν από τη μέτρηση ²:

Φαγητό	Κάπνισμα
Ποτό	Άσκηση

*Οι κατευθυντήριες γραμμές ATS/ERS που περιλαμβάνονται στις παρακάτω παραπομπές, αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται μπορούν να επηρεάσουν τις μετρήσεις FeNO και, ως εκ τούτου, η MGC Diagnostics συνέστησε την αποχή από αυτές τις δραστηριότητες μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. Συστάσεις για Τυποποιημένες Διαδικασίες ATS/ERS για διαδίκτυα και μη διαδίκτυα μέτρηση του εκπνεόμενου νιτρικού οξειδίου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και του ρινικού μονοξειδίου του αζώτου, 2205. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005; 171(8): 912-930.
2. Lidder S, Webb A. Αγγειακές επιδράσεις των διατροφικών νιτρικών (όπως περιέχονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και στα παντζάρια μέσω της οδού νιτρικών - νιτρικών - μονοξειδίου του αζώτου. British Journal of Clinical Pharmacology. 2013; 75(3): 677-696.



MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, through its subsidiary Medisoft S.A.
350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599

 Medisoft S.A. P.A.E de Sorinnes, Rue du Clairon 5
5503 Sorinnes BELGIUM

© 2024 MGC Diagnostics Corporation or one of its affiliates. All rights reserved.

All specifications subject to change without notice. Products may vary from those illustrated.

MGC Diagnostics and its affiliates are equal opportunity/affirmative action employers committed to cultural diversity in the workforce.

Part# 060178-018 RevA

