

PRIPRAVA BOLNIKA NA TESTIRANJE FeNO



TO JE PREDLAGAN PROTOKOL, Vendar so morda na voljo tudi drugi protokoli.

24 UR PRED TESTIRANJEM:

Priporočljivo je, da se 24 ur pred testiranjem izogibate uživanju alkohola ¹.

12 UR PRED TESTIRANJEM:

Priporočljivo je, da 12 ur pred testiranjem opustite kajenje ¹.

Priporočljivo je, da se izogibate uživanju živil z visoko vsebnostjo nitratov, kar med drugim vključuje naslednja živila ²:

Rukola	Repa	Korenje
Špinača	Zelje	Krompir
Solata	Stročji fižol	Česen
Redkev	Por	Sladka paprika
Rdeča pesa	Spomladanska mlada	Zelena paprika
Kitajsko zelje	čebula	
	Kumara	

DAY OF TEST:

On the day of the test, it is recommended to avoid any of the following 1 hour before the test ²:

Eating	Smoking
Drinking	Exercise

*V skladu s smericami združenja ATS/ERS, ki so priložene k spodnjim referencam, lahko navedene dejavnosti vplivajo na odčitke FeNO, zato je po priporočilih diagnostike MGC dobro, da se vzdržite teh dejavnosti samo za določen čas.

REFERENCE:

1. Priporočila združenja ATS/ERS za standardizirane postopke za samodejno in ročno merjenje izdihanega dušikovega oksida v spodnjem respiratornem sistemu in nosnega dušikovega oksida, 2205. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005; 171 (8): 912-930.
2. Lidder S, Webb A. Vascular effects of dietary nitrate (as found in green leafy vegetables and beetroot via the nitrate--nitrate-nitric oxide pathway. British Journal of Clinical Pharmacology. 2013; 75(3): 677-696.

MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, through its subsidiary Medisoft S.A.
350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599



Medisoft S.A. P.A.E de Sorinnes, Rue du Clairon 5
5503 Sorinnes BELGIUM

© 2024 MGC Diagnostics Corporation or one of its affiliates. All rights reserved.

All specifications subject to change without notice. Products may vary from those illustrated.

MGC Diagnostics and its affiliates are equal opportunity/affirmative action employers committed to cultural diversity in the workforce.

Part# 060178-022 RevA

